

By: Neda Omrani& Sara Asgari

1975

Gauze



OpSite



Allevyn



Acticoat



2005

Biobrane



Versajet

Vista





ACUTE RANGE DRESSING



Opsite Post-Op

پانسمان شفاف مخصوص بعد از عمل جراحي



Opsite Post-Op

پانسمان شفاف مخصوص بعد از عمل جراحی



- ضدآب با قابلیت تنفس پوستی
- ضدباکتری
- کاهش عفونت ثانویه و جلوگیری از انتقال آلودگی
- قابلیت مشاهده و بررسی زخم و میزان ترشحات از طریق لایه نازک
- جلوگیری از تعویض مکرر پانسمان/ مقرون به صرفه زمان و هزینه

Opsite Post-Op

پانسمان شفاف مخصوص بعد از عمل جراحی

موارد کاربرد


زخم های جراحی

جراحی های لاپاراسکوپی

بریدگی

خراش

تاول

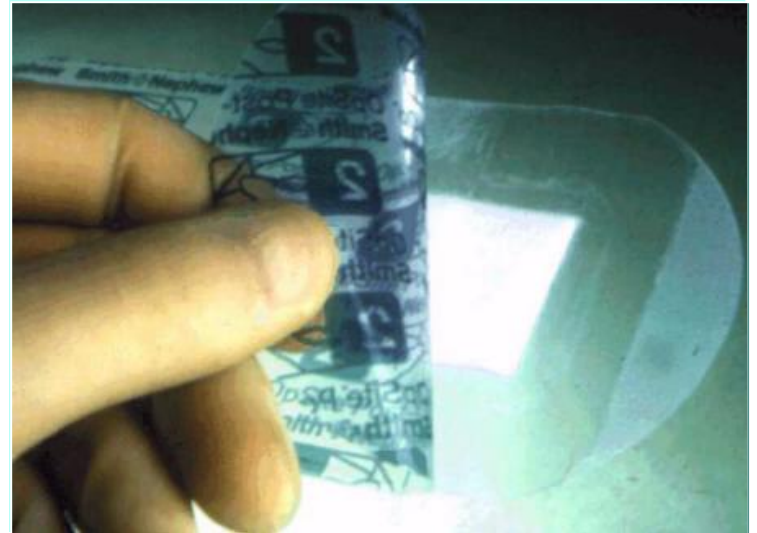

Primapore

پانسمان چسب دار مخصوص زخم جراحی



Primapore

پانسمان چسب دار مخصوص زخم جراحی

موارد مصرف:

- . زخم جراحی
- . بریدگی
- . پارگی
- . پانسمان مناسب انواع بخیه و بریدگی



MELOLIN (ملولین) پانسمان نجسب با قدرت جذب بالاي ترشحات زخم

MELOLIN پانسمان پنبه اي با پد اكريليك با قدرت جذب بالا مي باشد كه طی عملیات گرمایشی به يك لایه فیلم پلی استر منفذدار بسیار نازك چسبانده شده است.

MELOLIN داراي سه لایه مي باشد:

- لایه داخلي : فیلم نجسب منفذدار از جنس پلی استر در تماس با زخم
- لایه میانی : پد پنبه اي - اكريليك با قدرت جذب بالاي ترشحات
- لایه خارجي : غیر قابل نفوذ نسبت به آب



موارد استفاده MELOLIN

- پانسمان مناسب جهت انواع زخم با ترشح کم تا بسیار زیاد
- پانسمان ایده ال جهت سوختگی های جزئی و یا وسیع
- پانسمان مناسب جهت محل دهنده و گیرنده پوست
- پانسمان ایده ال جهت محل دهنده و گیرنده پیوند فولیکول مو
- پانسمان اختصاصی در بیماریهای پوستی با آسیب اپیدرم
- قابل استفاده به همراه پماد و کرم های تخصصی (جهت سوختگی ها و سایر موارد موردنیاز)


روش استفاده MELOLIN

- پانسمان MELOLIN را مناسب با اندازه زخم انتخاب یا ببرید.
- پانسمان MELOLIN را از سطح نچسب (فیلم پلی استر براق) بر روی سطح زخم قرار دهید.
- پانسمان MELOLIN را با سرجی فیکس و یا باند در محل موردنظر فیکس نمایید.
- هنگام تعویض پانسمان MELOLIN بدون ایجاد آسیب فیزیکی به راحتی از روی زخم جدا می گز



Opsite* Adhesive Incise Drape

درپ چسبدار محل عمل جراحی

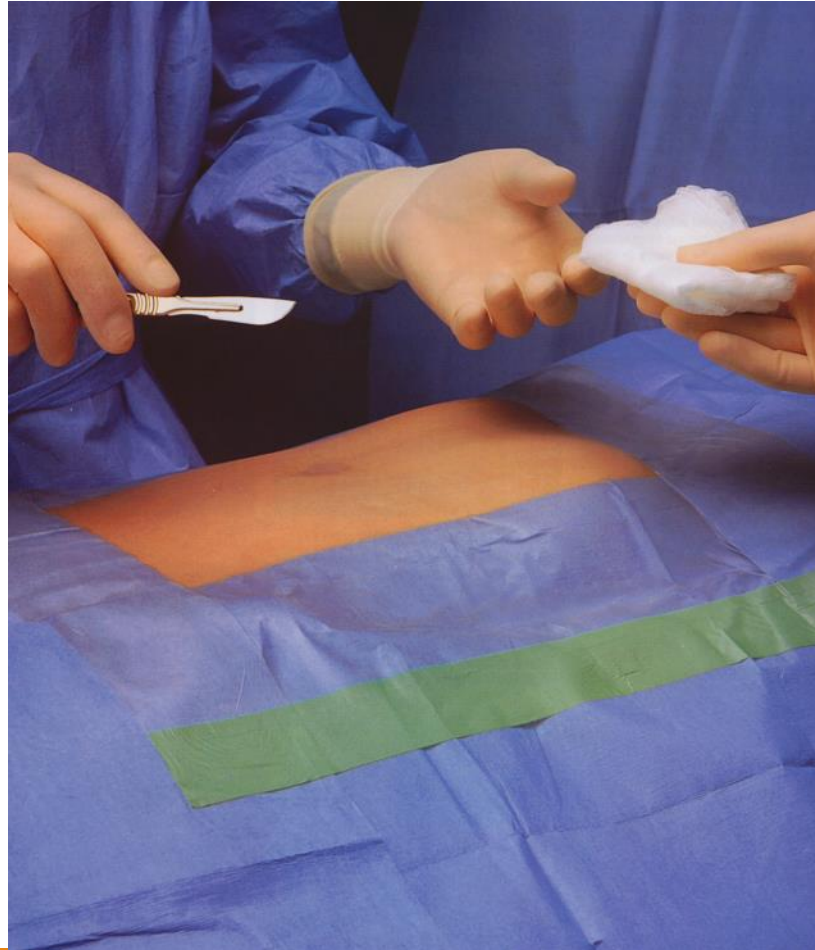

Opsite*Adhesive Incise Drape


درپ چسبدار محل عمل جراحی

از سال ۱۹۶۷ به دنیا معرفی شده است

• پلی اورتان فیلم

• چسب آکریلیک

• دسته های سبز رنگ

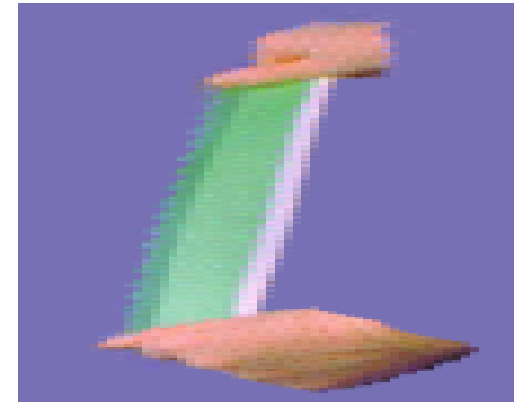

مزایای درپ جراحی



- | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| چسبیدن به لبه های زخم | نازک با قابلیت انعطاف بالا | ضد آب |
| ایجاد محیط استریل عمل | فیلم شفاف و جاذب نور | ایجاد سد باکتریایی |
| | | قابلیت تبخیر رطوبت |

Opsite Incise Drape انواع سائز

Code Size	Overall
4994	84 x 56cm
4989	55 x 45cm
4995	42 x 40cm
4988	28 x 45cm
4987	28 x 30cm

Opsite Incise Drape موارد مصرف

4989 55 x 45cm

4994 84 x 56cm




جراحی ارتوپدی




جراحی قلب باز
جراحی قفسه سینه
جراحی عروق

4987 28 x 30cm

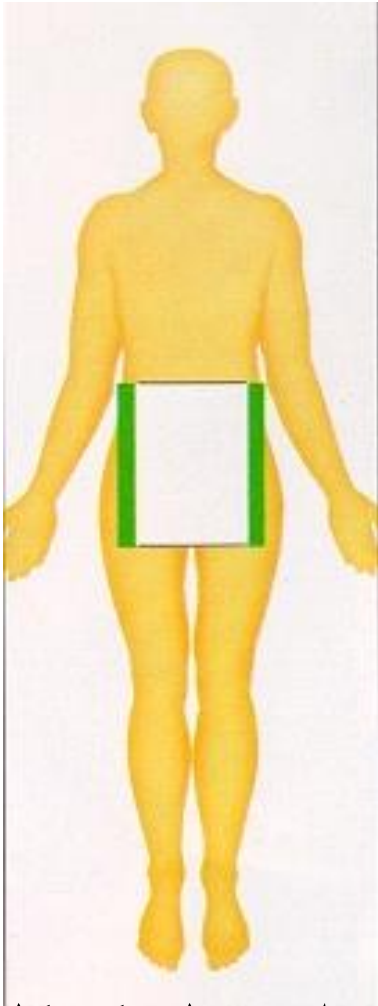


جراحی های کودکان
ترمیم هرنی

4988 28 x 45cm

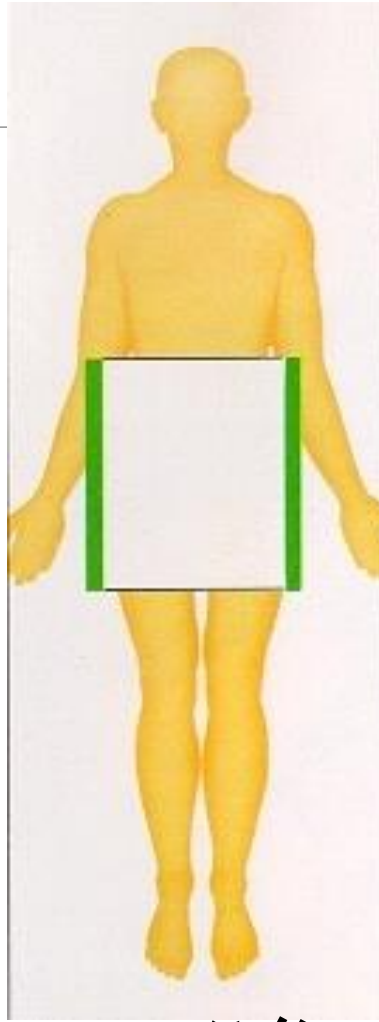


نفرکتومی
لامینکتومی

4995 42 x 40cm

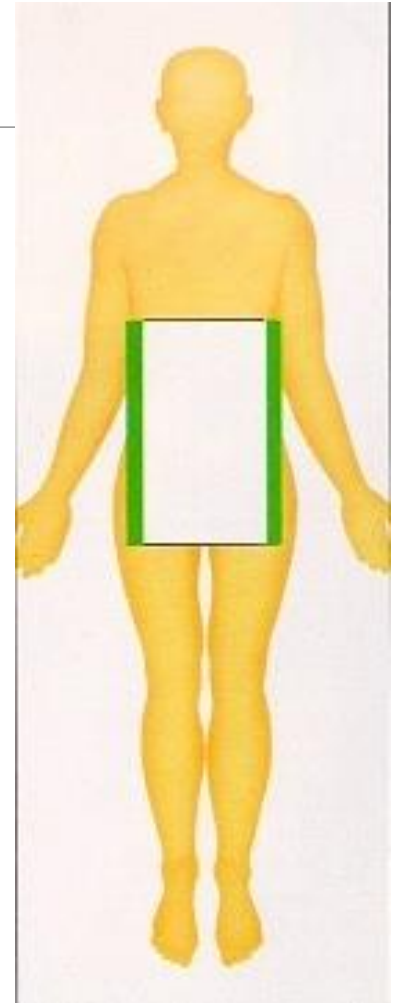


جراحی های شکمی
جراحی های نخاع

Opsite Incise Drape طريقة مصرف

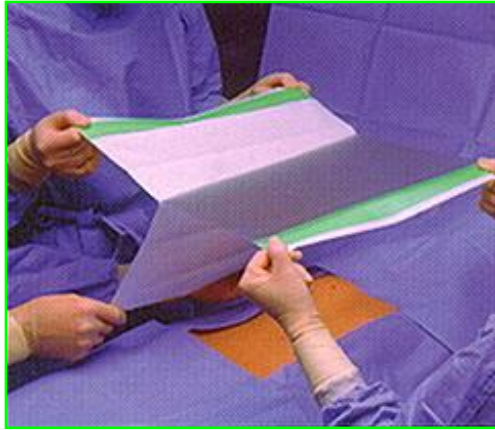

Select

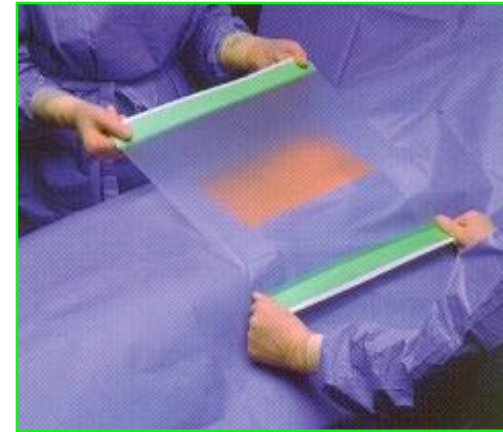

Position



Smooth



Secure


Opsite*IV 3000

پانسمان مخصوص آنژیوکت



Opsite*IV 3000

پانسمان مخصوص آنژیوکت

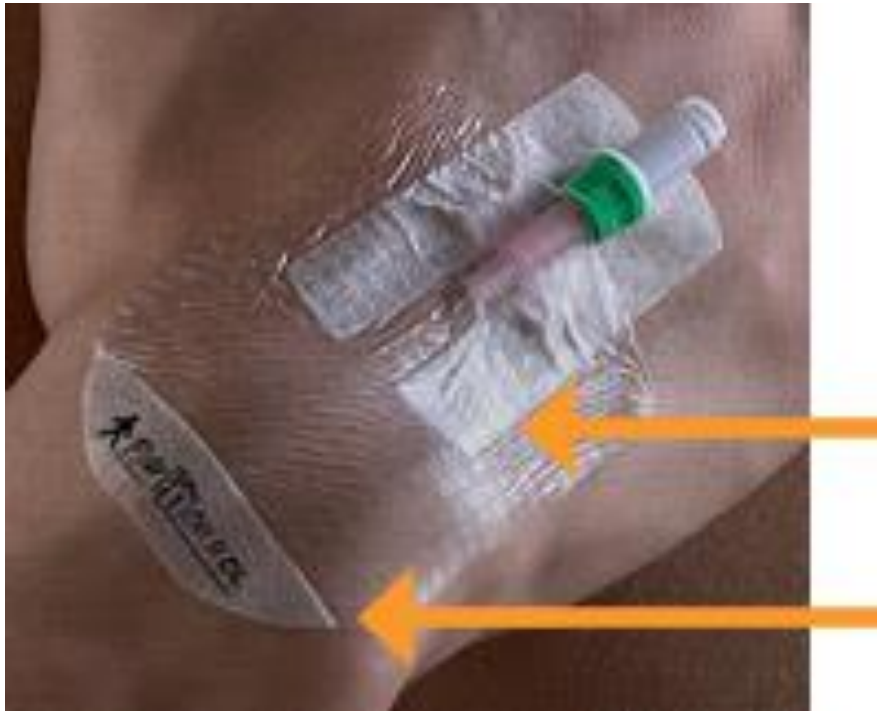

ضد آب و ضد باکتری، ویروس

کاهش بروز عفونت بیمارستانی و MRSA

MVTR:11000g/m²/24h/37°C

قابلیت تبخیر و کاهش خطر خیس خوردگی و عفونت

شفاف بودن و قابلیت رویت پانسمان

مشاهده و پیشگیری از فلیت و نشت مایع و خونریزی

■ نازک و قابل انعطاف

مناسب جهت مناطق با شکل آناتومیک مانند حفره بازو ، گردن و کشاله ران

Opsite*IV 3000

پانسمان مخصوص آنژیوکت



موارد استفاده:


مناسب جهت کودکان

پانسمان ایده آل کاتترهای محیطی و مرکزی

هرگز پانسمان آنژیوکت را با پنبه الکلی استفاده نکنید.

Opsite Flexigrid

پانسمان فیلم شفاف

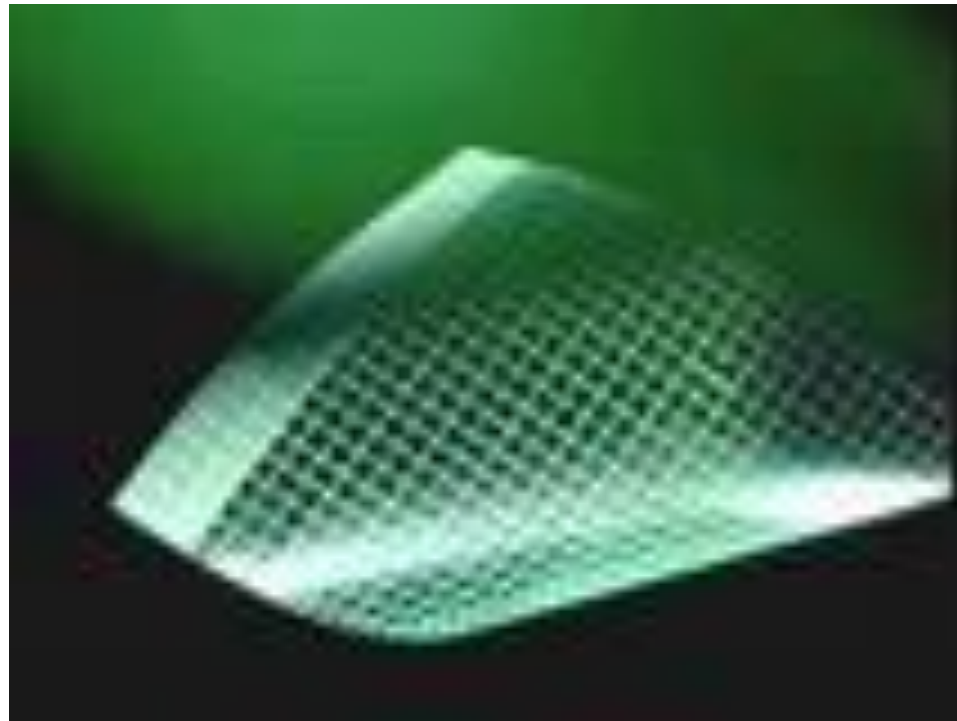

Opsite Flexigrid

پانسمان فیلم شفاف

پانسمان فیلم با چسب آکریلیک

تأمین رطوبت لازم جهت بهبود سریع و بدون درد زخمهای سطحی با دوام تا ۱۴ روز، مقرون به صرفه

فیلم ضد آب با سد باکتریایی

امکان استحمام و پیشگیری از عفونت ثانویه

تکنیک استفاده آسان و موثر


پانسمان شفاف امکان رویت آسان زخم در هنگام جاگذاری پانسمان

لایه فیلم نازک، شفاف با الگوی شطرنجی


امکان مشاهده مراحل بهبود زخم و امکان ثبت تغییرات اندازه زخم، قابل بایگانی در پرونده بیمار

قابلیت انعطاف و تطابق بر روی نواحی ناهموار بدن

قابل برش و قابل استفاده در نقاط ناهموار بدن مانند پاشنه پا، آرنج و زانو

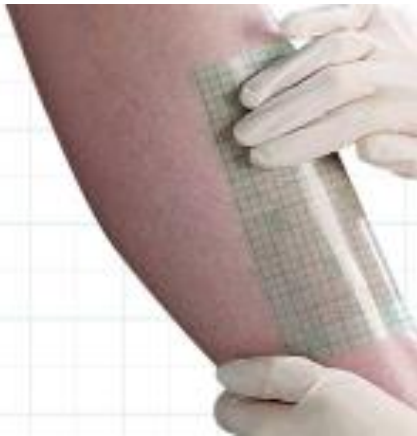

پانسمان فیلم شفاف Opsite Flexigrid

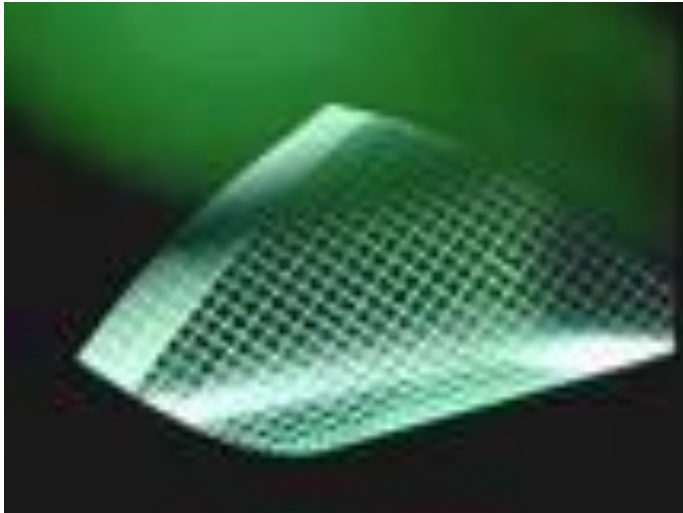

موارد مصرف:

پیشگیری از زخم فشاری و زخمهای فشاری سطحی

سوختگی های کوچک با آب داغ

بریدگی و خراشیدگی

محافظت از زخم پای بهبود یافته

محافظت پوست اطراف دهانه زخم و تورم پا

جهت ثابت نمودن کاتترهای محیطی و مرکزی

جهت تسکین درد در نوروپاتی های دردناک دیابتیک

محافظت پوست اطراف استوما و یا زیر کیسه ادراری متصل به پا

بعنوان پانسمان ثانویه بر روی Allevyn Cavity یا Intracore Gel

Opsite*Transparent Film Dressing Spray

پانسمان اسپری



Opsite*Transparent Film Dressing Spray

پانسمان اسپری

ویژگی و فواید:

قابلیت تراوایی به بخار، رطوبت و هوا

اجازه تنفس پوستی پوست اطراف زخم و کاهش خطر خیس خوردگی

غیر قابل نفوذ نسبت به آب و باکتری

امکان استحمام بدون خطر جدا شدن پانسمان

پانسمان یکدست و انعطاف پذیر

قابل استفاده آسان در مناطق ناهموار و دارای حرکت و جابجایی زیاد (مفاصل، برجستگی بند انگشتان)

استفاده سریع و آسان

لایه فیلم استریل

حفاظت زخم‌های جراحی خشک بعد از بخیه



Opsite*Transparent Film Dressing Spray

پانسمان اسپری

موارد مصرف:

انواع مختلف زخم‌های خشک و کوچک

بریدگی‌های کوچک ، خراشیدگی

بر روی بخیه‌های خشک

فیکس کردن لوله‌های درناژ

فیکساتورهای خارجی ارتوپدی (Steinmann pin)

بعد از برداشتن بخیه جراحی

روی ناحیه واکسیناسیون

لایه محافظ جهت تاول‌های باز شده



Opsite*Transparent Film Dressing Spray

پانسمان اسپری

روش استفاده:

قوטי اسپري را وارونه نموده و با فاصله ۱۵ سانتيمتر از محل زخم اسپري نماييد. جهت حصول نتيجه و تشکيل پانسمان بهتر، اسپري کردن را تا سه بار تکرار نماييد.

پانسمان بصورت يك لايه فيلم تا سه روز در محل باقي مي ماند.

نحوه برداشتن پانسمان:

پانسمان کاملاً خشک شده را مي توان بصورت پوسته پوسته و يا به وسيله چسباندن چسب نواري روي آن به راحتی از پوست جدا کرد.

موارد احتیاط:

. محتویات اسپری تنفس نشود و در فضاي باتهويه خوب استفاده شود.

. بامحلول هاي يددار استفاده نشود.

. دور از نور خورشيد، حرارت و دسترس کودکان باشد.

. جهت کودکان زیر ۱۸ ماه استفاده نگردد.



Cica-Care*

پانسمان ژل سیلیکون مخصوص اسکار



Cica-Care*

پانسمان ژل سیلیکون مخصوص اسکار

داراي درصد قابل قبولي از سیلیکون

چسبندگی خودبخود

بادوام و قابلیت استفاده مجدد

کوتاه نمودن طول دوره درمان و افزایش رضایتمندی مصرف کننده

شکل پذیر

قابل استفاده آسان در نقاط مختلف بدن از نظر آناتومیکي / لاله گوش جناغ سینه

قابل استفاده مجدد و مقرون به صرفه

قابل شستشو و قابل استفاده بین ۱۴ تا ۲۸ روز

استفاده آسان

خاصیت ضد حساسیت بالا

قابل استفاده در کودکان و بالغین



Cica-Care*

پانسمان ژل سیلیکون مخصوص اسکار

موارد استفاده:

اسکار زخمهای قدیم

جراحات های جدید التیام یافته

سوختگی

بریدگی

زخمهای کلونیدی قرمز رنگ و برجسته مانند: (سزارین و تیروئیدکتومی)

جراحی زیبایی و پلاستیک



نحوه و مراحل استفاده:

قبل از استفاده از پانسمان از بسته بودن کامل جراحات اطمینان حاصل نمایید.
از استفاده روی زخمهای عفونی و بخیه خودداری کنید.

۱. اسکار و پوست اطراف آن را شسته و خشک نمایید.
۲. پانسمان را به اندازه کمی بزرگتر از اسکار ببرید.
۳. بقیه پانسمان را در محل خشک و خنک نگهداری کنید.
۴. لایه پوششی پشت پانسمان را جدا نمایید.
۵. ناحیه چسبنده ژل را بدون کشیدن بر روی محل اسکار قرار دهید.
۶. اگر اسکار در محل آناتومیک دشوار قرار دارد ، می توان از بانداژ یا چسب استفاده نمود .
۷. ژل را روزی دو بار با صابون ملایم بشویید و قبل از استفاده مجدد با یک حوله بدون پرز خشک نمایید.



Cica-Care*

پانسمان ژل سیلیکون مخصوص اسکار

دوروز اول روزي ۴ ساعت، روز سوم و چهارم ، ۸ ساعت
و سپس روزي دو ساعت به زمان اضافه شود.

جدول و طول مدت درمان:


مؤثرترین نتایج زمانی حاصل می شود که حداقل ۱۲
ساعت و حداکثر ۲۴ ساعت در روز استفاده شود.

روز	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	دوماه	تا ۶ ماه
ساعت														
۴ ساعت														
۸ ساعت														
۱۰ ساعت														
۱۲ ساعت														
۱۴ ساعت														
۱۶ ساعت														
۱۸ ساعت														
۲۰ ساعت														
۲۲ ساعت														
۲۴ ساعت														

مدت درمان بسته به شخص و نوع زخم دارد.

ثبت دقیق دفعات استفاده در جدول مهم است.

بهترین نتیجه پس از ۴-۶ ماه بدست خواهد آمد.

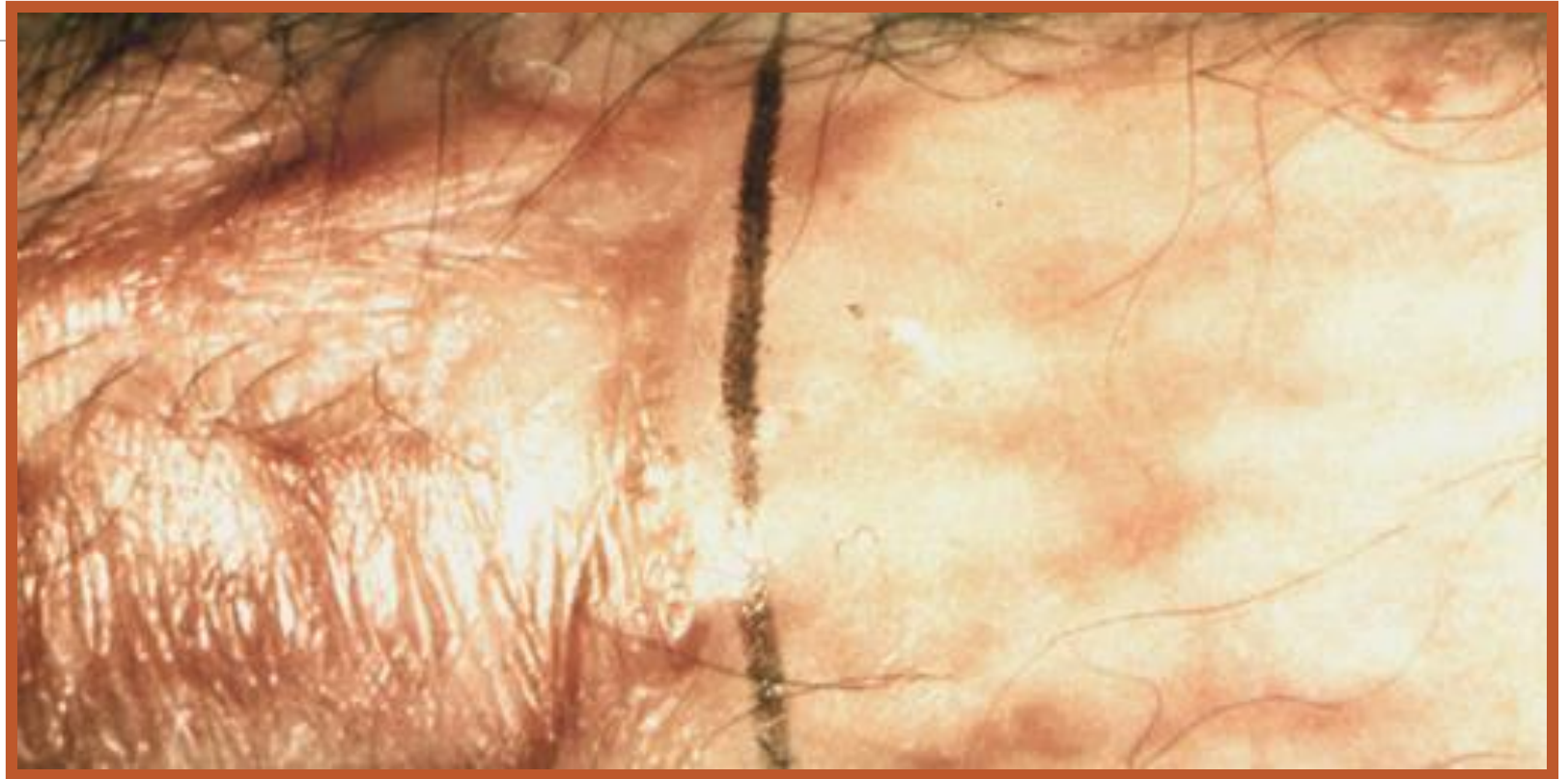







Effect of Cica-Care







CHRONIC RANGE DRESSING

Intrasite Gel




Intrasite Gel

CMC	2.3%
Propylene Glycol USP	20.0%
Purified Water	77.7%




Intrasite Gel

تأثیر بر زخم‌های اگزوداتیو با نکروز زرد رنگ
ایجاد رطوب مناسب با جذب اگزودای اضافه

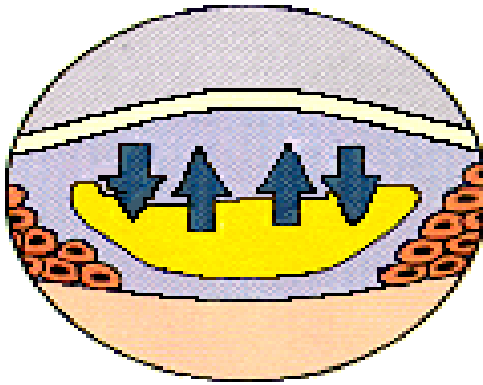

دبریدمان اتولیتیک قوی با اتولیز و
هیدراتاسیون بافت نکروتیک سیاه رنگ

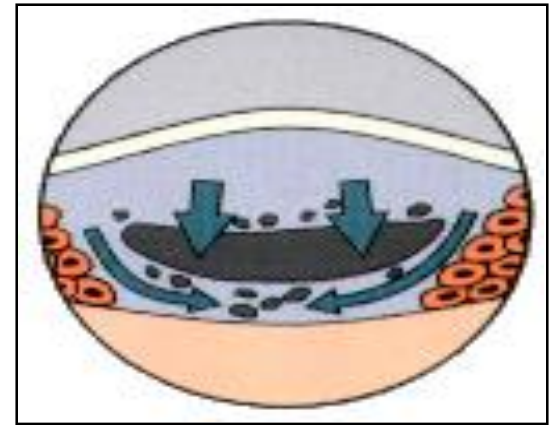

❖ دبریدمان بدون درد و خونریزی

❖ با خاصیت تسکین دهنده درد و خنک کننده در سوختگی های درجه دو سطحی

❖ با ویژگی منحصر به فرد حفظ شکل ژل در دمای بدن

Intrasite Gel

موارد مصرف:

- . درمان زخمهای سطحی و عمقی باز
- . زخمهای فشاری
- . زخمهای پا
- . زخمهای جراحی
- . زخمهای بدخیم
- . سوختگیهای سطحی
- . سوختگی با آب داغ
- . پارگیها و خراشها



Intrasite Gel

پانسمان باید همراه بایک پانسمان ثانویه استفاده گردد.

برحسب نوع زخم انتخاب و دفعات تعویض نوع پانسمان ثانویه مشخص می شود.



زخم نکروزه سیاه رنگ:

پانسمان از نوع فیلم Opsite Flexigride

زخم دارای بافت مرده زرد رنگ:

پانسمان جاذب مانند از نوع Allevyn



ALLEVYN: The world's No.1 foam dressing

ALLEVYN dressings

پانسمان الوین بهترین راه برای درمان زخم با
فراهم کردن چند خاصیت منحصر به فرد:

✓ کنترل مناسب ترشحات

✓ حداقل درد

✓ راحتی و اسایش بیمار

نتایج مطلوب درمانی برای بیمار و فراهم
کردن پانسمان با قدرت جذب فوق العاده






الوين

با طراحي منحصر به فرد كنترل ايده آل
ترشحات

عدم کنترل مناسب ترشحات یکی از مشکلات عدم بهبود زخم می باشد.

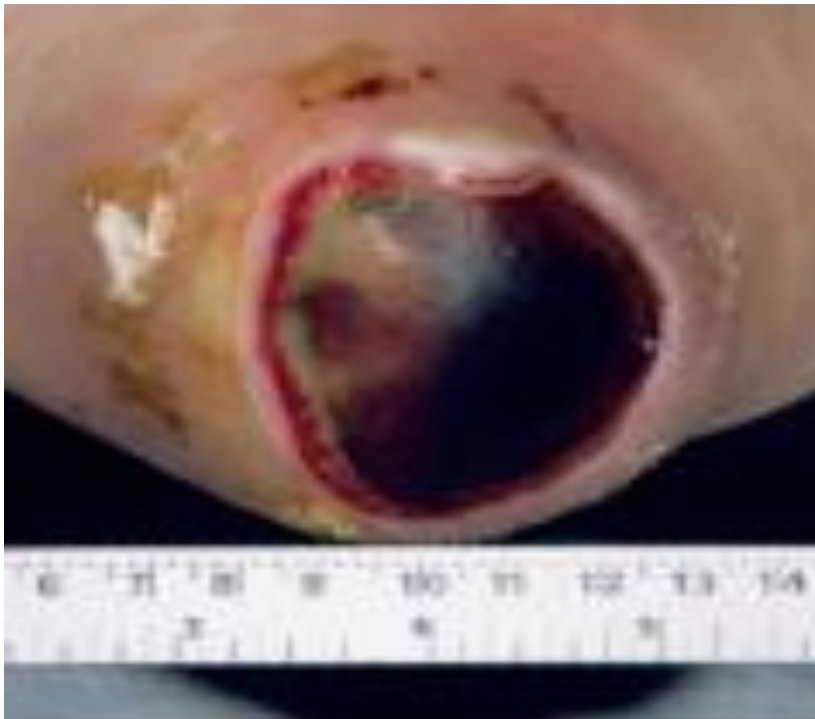

خشکی بیش از حد



خیس خوردگی و لیچ افتادن زخم

مشکلات همراه با عدم جذب مناسب ترشحات

- لیچ افتادگی
- افزایش ریسک عفونت
- افزایش دفعات تعویض پانسمان
- به تعویق افتادن زمان ترمیم



انواع پانسمانهای الوین


Adhesive
Non-Adhesive
Sacrum
Heel
Cavity
Tracheostomy



ALLEVYN Adhesive




ALLEVYN پانسماني با طراحي مدرن

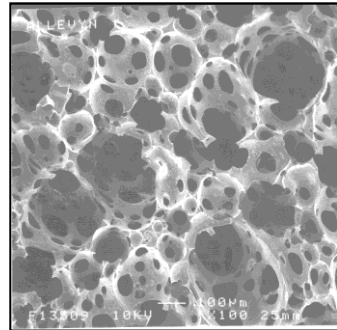

لایه
خارجي

- ضد باکتری
- ضد آب

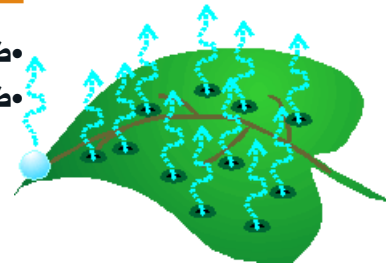

لایه میانی


- با خاصیت بالشتکی
- کنترل، جذب و نگهداری ترشحات جذب شده

لایه میانی

- با قابلیت جذب سریع ترشحات

لایه سوراخدار در تماس با زخم

- قابلیت عبور ترشحات زخم
- عدم آسیب به بافت گرانوله

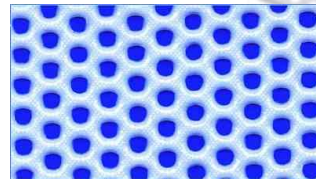

مزایای الوین

- ✓ کاهش خطر خیس خوردگی زخم
- ✓ کاهش تعداد دفعات تعویض پانسمان (ماندگاری حتی تا هفت روز)!!!
- ✓ آسایش و راحتی بیمار
- ✓ کاهش خطر عفونت ثانویه
- ✓ کاهش احتمال نشت ترشحات زخم

Allevyn Adhesive

موارد مصرف:

- زخمهاي گرانوله سطحي با ترشح كم تا زياد
- زخم بستر
- زخم پاي ديابتيك، زخم پاي وريدي و شرياني
- زخمهاي بدخيم داراي ترشح و خونريزي دهنده
- سوختگيهاي درجه ۲ با ضخامت سطحي تا عمقي
- محل دهنده گرافت پوستي
- Intraside Gel به همراه
- براي زخمهاي ترشح دارونكروزه



ALLEVYN Adhesive




Allevyn standard

Non-adherent Hydrocellular Dressing

پانسمان هاي فوم هيدروسلولار نچسب



پانسمان Allewyn با ساختمان سه لایه

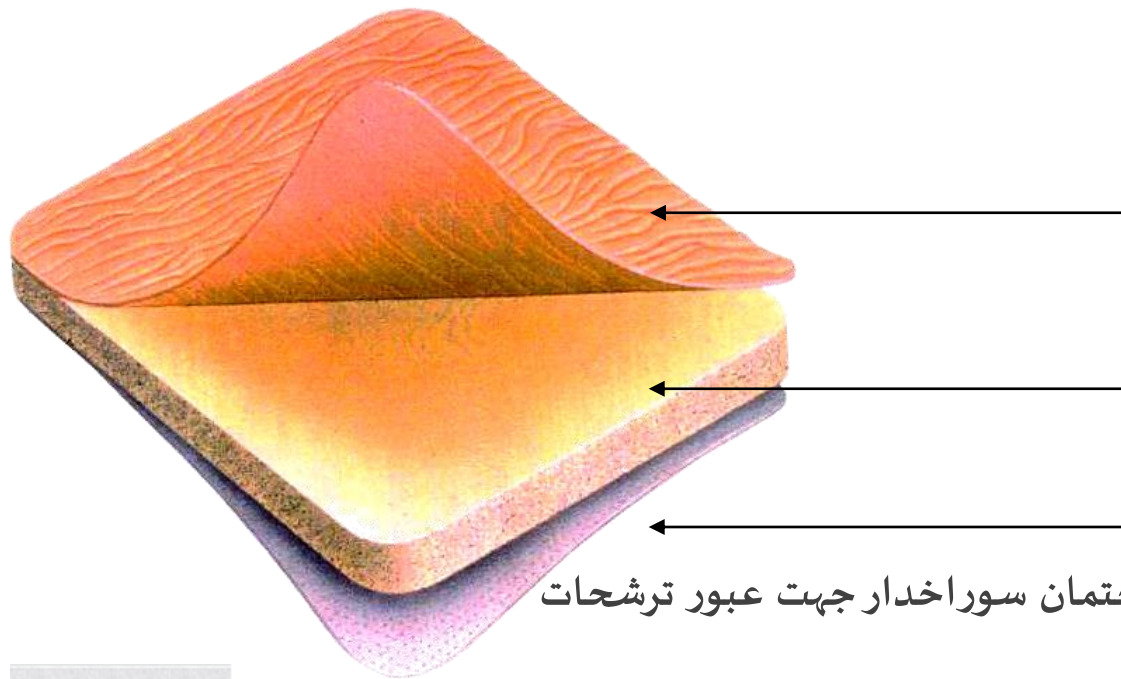

لایه خارجی ضد آب و باکتری

لایه مرکزی نرم و هیدروسلولار

با قابلیت جذب بالا

لایه نچسب در تماس با زخم با ساختمان سوراخدار جهت عبور ترشحات

Allevyn Standard



ویژگیهای یانسمان

قدرت جذب بالا

مقرون به صرفه


نرم وبالشتکی

استفاده آسان و راحت

درمان سریع زخم

بدون چسبیدن به سطح زخم

استفاده از الوین برای درمان این

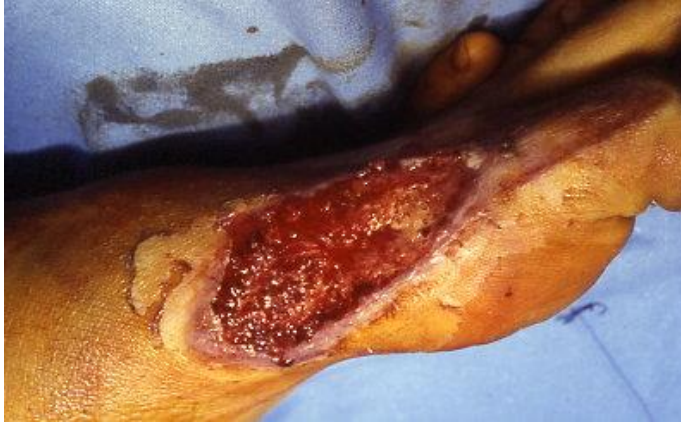

ALLEVYN Sacrum




ALLEVYN Sacrum



ALLEVYN Heel



ALLEVYN Heel

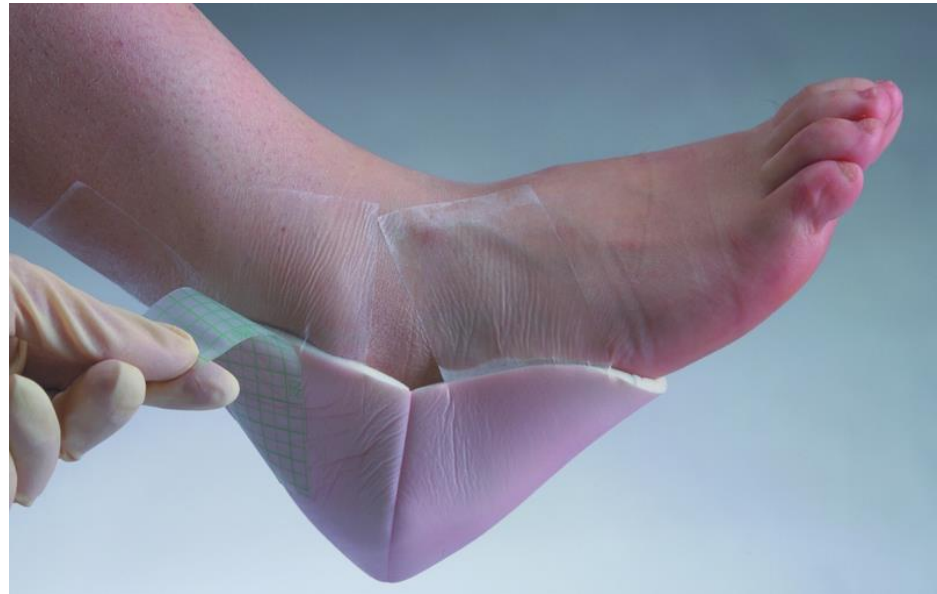

ALLEVYN Tracheostomy

پانسمان الوين تراکئوستومي




ALLEVYN Tracheostomy



ALLEVYN يك پانسمان با هزار مورد کاربرد



يك پانسمان با هزار مورد ALLEVYN کاربرد

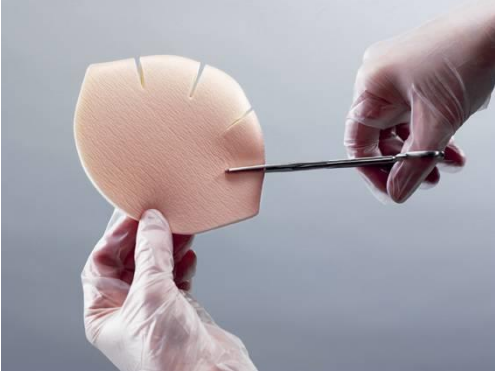


يك پانسمان با هزار مورد ALLEVYN کاربرد



زمان تعویض پانسمان



No need to change

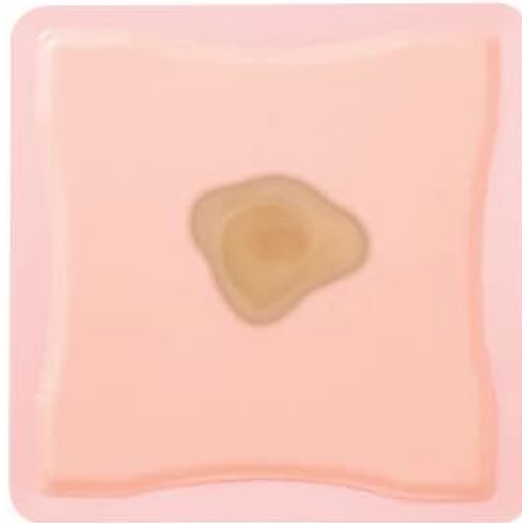


No need to change



Exudate within 2cm of the border, dressing requires changing

Allevyn in Action!

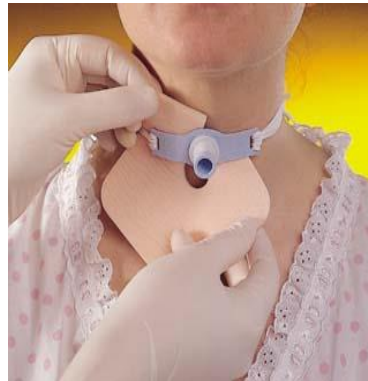

پانسمان های حاوی نقره Acticoat

One of oldest known antibacterial agents

Used for many purposes

Broad spectrum of activity

Well known by clinicians



پانسمان های حاوی نقره Acticoat

حاوی نقره عامل ضد میکروب وسیع الطیفی

موارد مصرف:


- انواع ورقه ای جهت زخم های سطحی تا نیمه عمیق عفونی
- انواع پرکننده جهت زخم های حفره ای یا عمیق عفونی
- پانسمان های نانو کریستال نقره ورقه ای در سایزهای بزرگ

مزایا:

قابلیت کنترل و درمان عفونت در انواع زخم های حاد و مزمن


معایب:

ممنوعیت مصرف در افراد با حساسیت شناخته شده به نقره

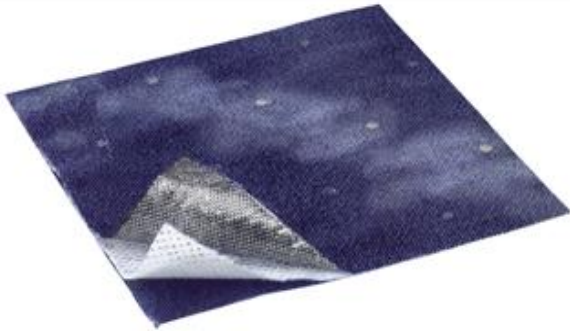

Nanocrystalline silver-coated high-density polyethylene mesh provides broad spectrum antimicrobial protection.

Ultrasonic welds bond the layers together.

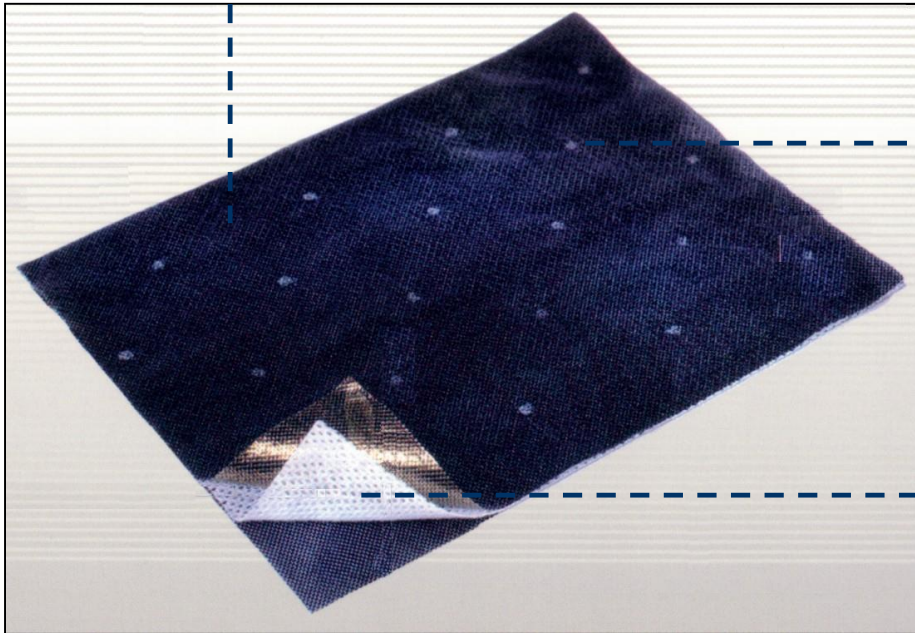


Rayon / polyester core helps maintain moisture level.

What is ACTICOAT 7?

Nanocrystalline silver-coated high-density polyethylene mesh provides broad spectrum antimicrobial protection.

Ultrasonic welds bond the layers together.

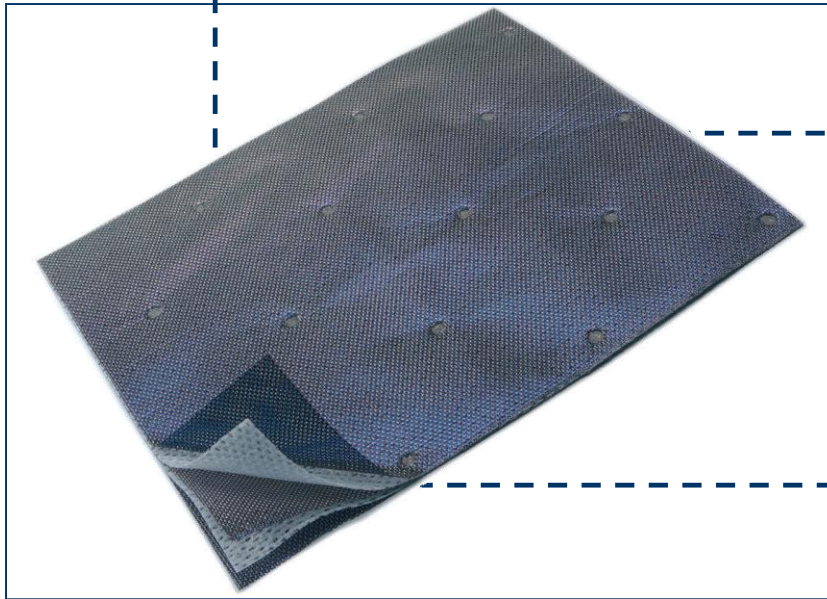

Rayon / polyester core helps maintain moisture level.

 We are **smith&nephew**